



<b>1. PROCESO/SUBPROCESO RELACIONADO:</b>	Gestión de la Cultura y el Bienestar / Gestión del Bienestar Universitario
<b>2. RESPONSABLE(S):</b>	Auxiliar de Odontología
<b>3. OBJETIVO:</b>	Estandarizar los procesos de limpieza del autoclave, necesario para la realización de procedimientos que a diario son programados y realizados en los servicios de La División de Salud Integral.
<b>4. ALCANCE:</b>	Equipos odontológicos en perfectas condiciones a pesar del uso.
<b>5. MARCO NORMATIVO:</b>	<b>Resolución 02183 de 09/07/04:</b> "Manual de Buenas Prácticas de Esterilización"

**6. CONTENIDO:**

No.	Actividad / Descripción	Cargo Responsable	Punto de Control
1	Frecuencia Diario	Auxiliar de Odontología	Registro de desinfección
2	<p>Materiales</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Toallas de papel</li><li>• Agua sola.</li><li>• No use desinfectante, al calentarse el autoclave mata todo microorganismo.</li><li>• Puede usar vinagre como alternativa para lavar las rejillas.</li></ul>	Auxiliar de Odontología	Registro de desinfección
3	<p>Procedimiento</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Limpie todas las superficies del autoclave para retirar suciedad o polvo</li><li>• Lave las rejillas puede usar vinagre para retirar el oxido o agua dura que deja el proceso de esterilización</li></ul>	Auxiliar de Odontología	Registro de desinfección



- Cargue el autoclave con agua destilada antes de utilizarlo.
- **No usar hipoclorito porque se oxida**

#### 7. FORMATOS:

#### 8. ABREVIATURAS Y DEFINICIONES:

**Autoclave:** es un recipiente de presión metálico de paredes gruesas con un cierre hermético que permite trabajar a alta presión para realizar una reacción industrial, una cocción o una esterilización con vapor de agua. Su construcción debe ser tal que resista la presión y temperatura desarrollada en su interior. La presión elevada permite que el agua alcance temperaturas superiores a su punto de ebullición. La acción conjunta de la temperatura y el vapor produce la coagulación de las proteínas de los microorganismos, entre ellas las esenciales para la vida y la reproducción de éstos, cosa que lleva a su destrucción.

#### 9. REGISTRO DE MODIFICACIONES:

FECHA	VERSIÓN : No	CÓDIGO	MODIFICACIONES
17-12-2014	0	PA-GU-7-PT-16	Elaboración protocolo: Limpieza del Autoclave

#### 10. ANEXOS:

N. / A.



Universidad  
del Cauca

División de Gestión de la Salud Integral y el Desarrollo Humano  
Limpieza del autoclave

Código: PA-GU-7-PT-16

Versión: 0

Fecha de actualización: 17-12-2014

Página 3 de 3

ELABORACIÓN	REVISIÓN
Funcionario Responsable	Responsable Subproceso
Cargo: Profesional Universitario	Cargo: Profesional Especializado
Fecha: 07-08-2014	Fecha: 08-08-2014
REVISION	APROBACION
Responsable Proceso	
Cargo: Vicerrector (a.) Cultura y Bienestar	Rector
Fecha: 11-08-2014	Fecha: 17-12-2014

**Nota:** La firma en el espacio revisión - responsable de subproceso, aplica cuando el subproceso exista.